

お風呂上がりのポタポタ経血にバイバイ!


誰でも簡単! ナプラスe の使い方

詳しくはこちらから ▶



Step 1

入浴前 にスタンバイしてから、入浴タイムへ♪

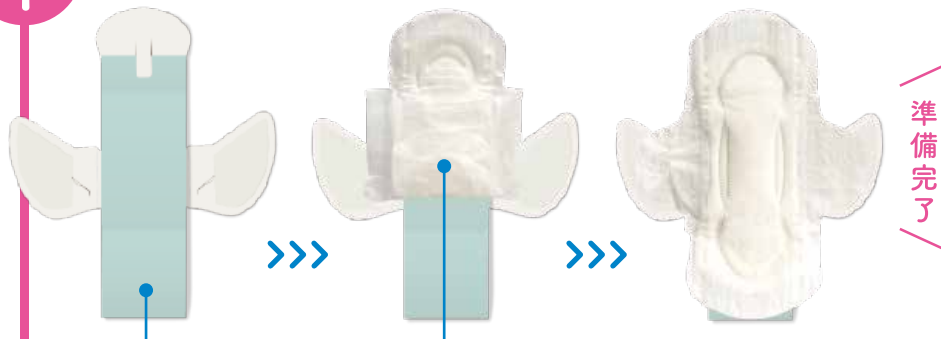


準備完了

ナプラスe に、ご自身のナプキン のシールを剥がして 貼り合わせる

Before bathing, remove the wrapper from the sanitary pad and attach the pad to the Naplus-e.
 洗澡前, 将卫生巾的包装纸取下, 并将卫生巾贴在 Naplus-e.
 생리대 뒷면 종이를 떼어낸 후, 나플러스e에 생리대를 붙입니다.

Step 2

入浴後 すぐにナプラスe をデリケートゾーンに挟みます。
 下着をはかなくても、そのままスタスタ歩けます!

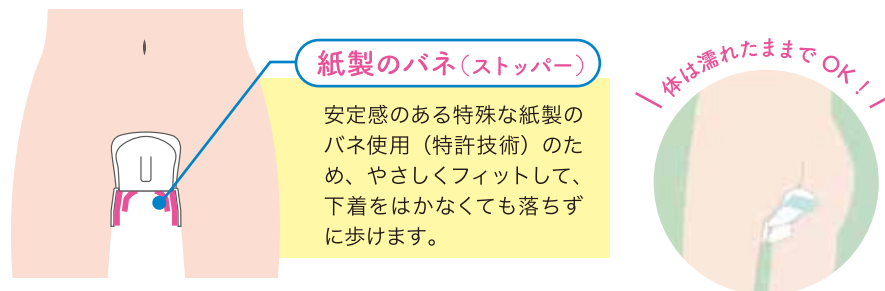

紙製のバネ(ストッパー)

安定感のある特殊な紙製のバネ使用(特許技術)のため、やさしくフィットして、下着をはかなくても落ちずに歩けます。

体は濡れたままでOK!!

足を大きく開くと、挟みやすい!

優しくピッタリ当ててね!

After bathing, immediately put Naplus-e between your intimate area.
 洗澡后, 立即将 Naplus-e 放在私处之间。
 목욕이 끝난 후, 생리대를 붙인 나플러스e를 델리ケート 존에 끼웁니다. (몸이 젖은 상태에서 사용하실 수 있습니다.)

Step 3


その後はゆっくりとスキンケアや体を拭いていただけます。



After setting it, you can take your time to do skincare and dry your body.
 然后你可以按自己的节奏护理皮肤、擦拭身体。
 나플러스e 부착 후, 몸을 닦거나 스킨케어를 하실 수 있습니다.

Step 4

下着をはいた後は、ナプラスe だけをスルッと取り出します。
 ナプキンはそのまま下着に残ります。まるで手品みたい!?

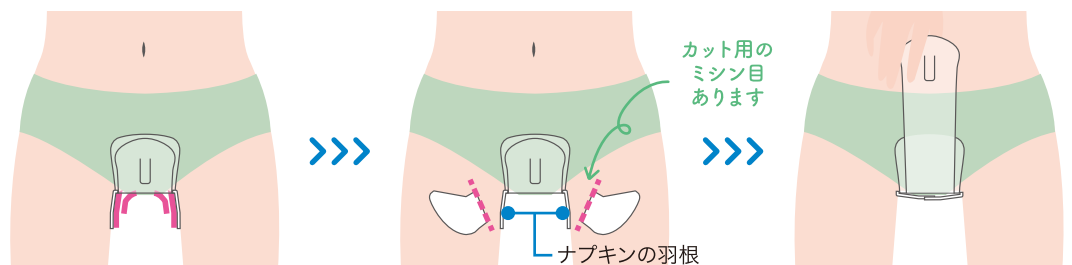

挟んだまま下着をはく
 (羽根部分は下着の外に出したまま)

Wear underwear while holding it.
 穿上内衣时, 保持它在原位。
 나플러스e를 부착한 채로 속옷을 입습니다.

ナプラスe の羽根を
 ナプキンから剥がしてカット

Cut the Naprus-e wings from the pad.
 从卫生巾上剪下 Naprus-e 的护翼。
 나플러스e의 날개부분을 생리대에서 떼어낸 다음 날개를 뜯어냅니다.

つまんだ台紙を前から
 真っ直ぐ引っ張り出します

Pull the Naplus-e body straight out from the front.
 从前方将 Naplus-e の本身直接拉出。
 나플러스e의 앞부분을 잡아당겨 나플러스e를 제거합니다.